

# SCREEN

ALCOL TEST

Questo test fornisce unicamente un'analisi preliminare. L'utente è l'unico responsabile della decisione di mettersi alla guida.

**INSERIRE IL TAMPONE IN BOCCA PER 10 SECONDI IMPREGNANDOLO DI SALIVA. LEGGERE IL RISULTATO DOPO 2 MINUTI CONFRONTANDO IL COLORE DEL TAMPONE CON LA SEGUENTE SCALA DEI RISULTATI.**

guida consigliata



tasso alcolico

0,00 g/l

0,20 g/l

0,50 g/l

0,80 g/l

1,50 g/l

Prima di effettuare il test portarlo ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 30°C. Conservare tra i 2° ed i 30°C. Non introdurre nulla in bocca, inclusi cibo, bevande, tabacco, chewing-gum per almeno 10 min. Prima di effettuare il test. Non leggere il risultato dopo 10 minuti. Tenere il test fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Test qualitativo indicativo. Prodotto non destinato per uso medico o diagnostico.

Importato e distribuito da:

**Screen Pharma Srls**

Via Settevalli, 448 - 06129

Perugia - Italia

[www.screenpharma.it](http://www.screenpharma.it)



912400696